

왜 GBT인가 ?

1. 더 좋은 예방치과를 위한 게임 체인저
2. 건강한 구강 = 건강한 몸
3. 최고의 임상 프로토콜 = 최고의 임상 결과.
GBT는 치아우식, 치은염,
치주질환의 위험을 감소시킵니다.

“바이오필름이 완전히 제거되었기 때문에 이것을 확신할 수 있습니다.”

* Nicole Einemann 과 Manuela Cordes, 치과위생사, Dr. Arendt Dental, Bremerhaven, Germany



4. 환자는 GBT를 원합니다
더 이상 공포도, 불편함도 없습니다. 단 한번의 경험으로 GBT를 사랑하게 될 것입니다. 특히 어린이라면 더욱 그렇습니다.
5. 임상가는 만족하고 환자는 편안합니다. 인체공학적인 기기로 효율적이고 체계적인 워크플로우가 가능해집니다. 스트레스, 손목 터널 증후군, 바이오필름을 GBT로 날려 버리세요
6. 성공적인 치과 경영 -
좋은 치료는 좋은 수입으로 이어집니다. GBT 팬이 된 환자들은 당신의 치과를 추천할 것입니다.
7. 구강의학과 예방은 치과업계의 미래입니다.
GBT는 예방치과의 미래입니다.
8. GBT는 놀라운 "I FEEL GOOD" 경험입니다.
환자와 임상가는 최첨단 기술을 사랑합니다.
9. 정기적인 GBT 리콜은 환자의 구강이 건강하게 유지되는 것을 보장합니다.



More about GBT



Ems-dental.com



EMS 
MAKE ME SMILE.

GBT 치료 방법

1. 진단 및 감염 관리

환자와 술자 모두 감염 관리를 시행합니다. GBT 치료 전, 환자 구강을 박터 X 프로로 40초간 가글합니다. 각 환자마다 치은연상 및 치은연하에 대한 진단 내용을 기록합니다.

2. 바이오필름 염색

바이오필름이 눈에 보이도록 염색한 후 환자에게 설명하는 단계입니다. 많은 연구에서 확인된 것처럼, 충치, 치은염, 치주염 등 모든 구강 질환의 원인 95%는 바이오필름입니다.

3. 동기 부여

홈케어와 치과에서 받는 전문 관리 모두의 중요성을 알려주는 단계입니다. 환자에게 올바른 구강 관리법을 알려줍니다

4. 에어플로우® MAX

에어플로우® MAX와 플러스 파우더로 치은연하 4mm까지의 바이오필름을 닦아냅니다. 오리지널 에어플로우는 최소침습이며, 통증을 유발하지 않습니다.*

5. 페리오플로우®

페리오플로우® 노즐과 플러스 파우더로 치주낭 9mm까지의 바이오필름을 제거합니다.*

6. 피에존® PS

오리지널 스마트 피에존® PS팁으로 남은 치석만 부드럽게 제거합니다.*

7. 확인

바이오필름과 치석이 완전히 제거되었는지, 숨어있던 치아우식이 있는지 확인하는 단계입니다. 기존의 치아 클리닝은 접근이 어려운 바이오필름의 50%만 제거할 수 있었습니다. 출처: Warentest 7/2015. **NO MORE POLISHING.** Polishing and grinding with abrasive pastes is truly no longer necessary. Why produce unnecessary smear layers?"

8. 리콜 예약

환자에게 GBT 설문지를 권유하십시오. GBT 치료를 개선하는 데에 큰 도움이 됩니다. 다음 리콜 일정을 잡으십시오.

*치과에서 GBT 실제 시행법, 에어플로우® 시 에어로졸을 줄이는 방법, 페리오플로우를 정확히 사용하는 방법, 기중 위험을 최소화하는 방법 등을 SDA (스위스덴탈아카데미)에서 배워보십시오.



More about GBT



Ems-dental.com



EMS+
MAKE ME SMILE.

GBT 데모 신청하기 <https://gbt-dental.com/ondemo>